

Using SNAP® Test Kits

혈청, 혈장, 전혈* 검체 사용법



1. 튜브에 샘플(혈청, 혈장, 전혈) 3방울과 컨주게이트 4방울을 넣는다.

2. 4~5회 전도한다.

3. 전량을 스냅 샘플 웰에 넣는다.

주의점

1. 전혈은 EDTA 또는 헤파린 함유고체 처리된 전혈
2. Feline HW는 샘플 2방울 + 컨주게이트 5방울을 섞는다.
3. 혈장염키트(cPL, fPL) 검사는 반드시 혈청을 사용한다.
4. 모든 키트와 컨주게이트는 실온에 30분~1시간 방치 후 사용

분변 검체 사용법



1. 샘플 swab 후 튜브에 끼운 다음 튜브 뒷부분을 꺾는다.

2. 샘플과 컨주게이트가 섞이도록 튜브 앞부분을 3회 누른다.

3. 5방울을 샘플 웰에 넣는다.



4. Activation circle의 색이 변한 즉시 스냅을 누른다.

5. 적정 시간에 결과 판독

결과 판독

KEY 결과 판독 시간 실온 또는 냉장 보관 냉장 보관
모든 키트와 컨주게이트는 실온에 30분~1시간 방치 후 검사 진행한다

VECTOR-BORNE	<p>4Dx®</p>	<p>Canine Heartworm</p>	<p>Feline Heartworm</p>
	<p>Feline Triple™</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Tech Tip</p> <p>R-E-D 3방울의 전혈, 혈청, 혈장</p> <p>B-L-U-E 4방울의 컨주게이트</p> <p>B-R-O-W-N 5방울의 컨주게이트와 섞인 분변</p> </div>	
	<p>Pancreas-specific lipase</p> <p>Abnormal 샘플 스맛 컬러가 기준 스맛 컬러와 같거나 짙은 경우</p> <p>Normal 샘플 스맛 컬러가 기준 스맛보다 옅은 경우</p>	<p>cPL (canine pancreas-specific lipase)</p> <p>fPL (feline pancreas-specific lipase)</p>	
FECAL	<p>Parvo</p>	<p>Giardia</p>	