

1. 검체의 전처리

전혈 검체



1. Greena Cap을 제거 한다.



2. 채혈 한 혈액을 지정된 선까지 주입한다.



마만 확산표 표시선 아래까지 채워 넣는다. (0.7cc)



3. 용기를 수평으로 놓은 상태에서 5회 정도 동글게 돌린다.



4. 그림과 같이 용기를 기기에 장착시킨다.

혈장 또는 혈청 검체 : 채혈 용기는 Lithium heparin 또는 SST 용기사용(EDTA 사용금지)




1. 채혈한 용기를 원심분리한다.



2. 파이펫터를 이용하여 300 μ L를 샘플 원에 옮겨 담는다.



3. 그림과 같이 용기를 기기에 장착시킨다.

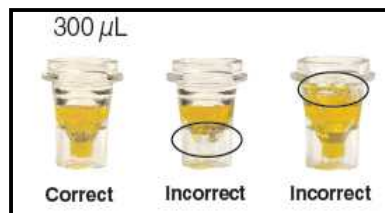

2. 기계 사용법

- 1) IVLS Touch-screen에서 'Analyze sample' 선택하여 환측정보 입력 및 기기 선택
- 2) Catalyst Dx화면의 Pending list에서 환측 선택 후 Select
- 3) 검사 종류 및 샘플 종류를 선택 후 NEXT
- 4) 샘플 및 슬라이드 준비 및 장착(Lyte 4 Clips 검사가 있을 시 가장 먼저 장착)
슬라이드는 포장지 개봉 후로부터 Lyte 4 Clips는 2분 이내, 다른 Clipes들은 5분 이내에 장착
- 5) RUN 을 선택한다.