

POCH 작동법

1. 검체의 전처리

EDTA 전혈 검체(3.0mL Tube, 1.3mL Tube 둘 다 사용가능)

검사 전 10번 정도 전도 혼합

2. 기계 사용법

- 1) EDTA 전혈 검체 준비
- 2) 장비의 Touch-screen에서 환측의 중을 선택하고 환측정보 입력한다.
- 3) 검체 장착하는 부분을 눌러 열고 채혈 용기 크기에 맞춰 Adaptor를 장착한다.
- 4) Adaptor에 채혈 용기를 삽입한다.
- 5) Run 버튼을 누르면 검사가 진행 된다. (총 검사 소요시간 : 2분)

3. Shut down하는법(하루에 한번,24시간 내에 실시)

- 1) 장비 내 터치스크린 오른쪽 하단에 Shutdown 버튼 클릭->Excute버튼 클릭
- 2) 2분 정도 소요 후 장비 자체 버튼을 눌러 끈다.

4. Clean transducer 하는 방법(2주에 한번 실시)

- 1) 터치스크린에서 다음과 같이 진행한다.
Menu -> maintenace -> Clean tranceducer 클릭
- 2) Cell clean을 준비하고 스폰이드로 3mL를 튜브에 옮긴다.
- 3) Excute버튼을 누른다.

5. Reagent KIT 교체 방법

(유효기간 : Cellpack 개봉 후60일, LVD 개봉 후 90일)

- 1) 터치스크린에서 다음과 같이 진행한다.
Menu-> Chang Reagent -> Diluent or LVD 선택
- 2) 준비 해 놓은 새 Reagent KIT의 뚜껑을 제거 후 connect를 새 시약에 넣는다.
- 3) 터치스크린에서 Excute 버튼을 누른다.

6. Clean W. chamber 하는 방법(3개월에 한번 실시)

- 1) 터치스크린에서 다음과 같이 진행한다.
Menu -> maintenace -> Clean W. chamber클릭
- 2) Cell clean을 준비하고 스폰이드로 3mL를 튜브에 옮긴다.
- 3) Excute버튼을 누른다.

