

1. 검체의 전처리

반드시 혈청 검체 사용

혈청검체: SST 용기 권장, 분주후 20분 정도 용기를 세워둔 후 원심분리

반드시 키트를 실온에 30분에서 1시간 꺼내 놓은 후 사용

2. 기계 사용법

- 1) 메인 메뉴에서 1)NEW SAMPLE을 선택
- 2) 화면상의 내용 즉, 환측 중,환측 ID,환측명 입력후 E Key.
- 3) T4, Cortisol, Bile Acid 중 검사하고자 하는 중목을 선택 후 E Key
- 4) 준비된 검체 혈청의 중간에 피펫팁을 담그고 피펫 상단의 버튼을 누른다.
〈삐〉소리와 함께 검체 흡입
- 5) 〈삐 삐〉소리가 나면 피펫을 검체에서 빼고
- 6) 박스에 포함된 튜브에 옮겨 피펫 상단의 버튼을 누르면 그림 1과 같이 떨어진다.
- 7) 그림 2와 같이 권추게이트를 첨가한 후 3-5회 전도로 mix 한다
- 8) 5분동안 incubation 한다. **Bile acid는 절대 가온하면 안된다.**
- 9) 그림 5와 같이 전량을 스냅 샘플 웰에 붙는다.
- 10) Activation circle에 반응이 나타나면 스냅을 누른 후 **바로** 스냅리더에 넣는다.
- 11) 만약 생화학 검사가 있다면 슬라이드를 넣은 후 검사 진행한다.
- 12) 생화학 검사가 없다면 E key를 누른 후 main menu 화면이 나타나게 한다.

******* 검사가 끝나고 나면 꼭 사용한 팁 제거*******

