

VetAutoread 작동법

1. 검체 채취

전혈 검체: 채혈 용기는 EDTA-K3사용(Heparine 사용금지)

채혈후 분주시 주사기 침을 분리하고 **정량분주(0.75ml를 넘지 않는다)**

분주후 30초 정도 용기를 혼합.



2. 검체의 전처리

- 1) QBC Pipette에 전용 capillary tube 장착
- 2) EDTA tube 전도후 Pipette 으로 검체 흡입(111ul)
- 3) Capillary 뚜껑을 완전히 장착후 Capillary를 뺀다.



- 4) Capillary를 30초 정도 손으로 혼합.
- 5) Float을 Capillary에 삽입.
- 6) 원심 분리기에 대칭으로 놓고 원심.
- 7) 원심후 Capillary Tube를 뺀다.



2. 측정

- 1) 중을 선택한 후 Capillary tube를 리더기에 장착하여 측정.
- 2) 60초후 결과지 출력.

