

1. 검체의 전처리

혈장 검체: 채혈 용기는 Lithium heparin 사용

혈청 검체: 채혈용기는 SST 용기 권장

2. 기계 사용법

- 1) 검체 준비 (전혈, 혈장, 혈청)
- 2) ANALYZE SAMPLE? -> YES 또는 NO로 환축 선택
- 3) 샘플 door을 열고 샘플을 Probe에 댄다.
- 4) '삐' 소리가 나면 Probe를 뒤편 door을 닫는다.
- 5) 결과를 확인한다.



3. STANDBY 상태에서 사용법

- 1) STANDBY -> NO
- 2) LEAVE STANDBY MODE -> YES
- 3) ELECTRODE MAINTENANCE? -> YES
- 4) Perform Weekly Cleaning? -> NO
- 5) Perform Conditioning Now? -> YES 누른 후 Daily sol.으로 검사 시행
- 6) Remain in Maintenance? -> NO
- 8) CALIBRATE... 후 ANALYZE SAMPLE? 상태가 되면 검사 진행한다.

4. Sol. 팩 교체 및 용량 체크

- 1) ANALYZE SAMPLE? 에서 NO를 3번 누른다.
- 2) OPERATOR FUNCTIONS? -> YES
- 3) Check/Change Reagent Pack? -> YES
- 4) 95% Remain/Install New Reagent?
시약 교체 후 YES, 용량 확인 시 NO
- 6) NO를 선택하여 ANALYZE SAMPLE?로 이동한다.

5. 유지 관리

- 1) 주 1회 Weekly Cleaning을 한다.
- 2) 매일 Daily Cleaning을 한다.
- 3) 검체는 혈장 또는 혈청을 권장합니다.