

1. 검체의 전처리

혈장 검체: 채혈 용기는 Lithium heparin 사용(EDTA 사용금지)

혈청검체: 채혈용기는 SST 용기 권장

채혈후 분주시 주사기 침을 분리하고 **정량분주**

분주후 30초 정도 용기를 혼합후 원심분리



2. 기계 사용법

- 1) 메인 메뉴에서 **1)NEW SAMPLE**을 선택(IVLS 사용 시 생략)
- 2) 화면상의 내용 즉, **관측 중,관측 ID,관측명 입력후 E Key**.(IVLS 사용 시 생략)
- 3) 화면에 슬라이드 모양이 나오면 원하는 슬라이드를 넣는다.
- 4) 12항목을 다 넣으면 자동으로 다음단계로 넘어가고, 이하로 넣었을 경우 **E key**를 누른다.
- 5) **Tip** 을 **Pipette**에 끼우고 Pipette을 원위치에 장착후 **E Key**.
- 6) 준비된 검체 **혈장의 중간에 피펫팁을 담그고 피펫 상당의 버튼을 누른다.**
- 7) 버튼을 누르면 한번의 <삐> 소리와 함께 검체를 흡입.
- 8) <삐 삐>소리가 나면 **피펫을 검체에서 빼고**
- 9) <삐 삐 삐>소리가 나면 **팁끝에 공기층이 형성되고,그부위를 휴지로 닦는다.**
- 10) 곧바로 **파이펫을 피펫홀드에 넣으면 자동분주,분석 진행**
- 11) 6분후 검사가 끝나고 **<E> Key를 누르면 결과가 프린트로 출력**

****** 검사가 끝나고 나면 꼭 사용한 팁을 제거*******

